

TACTEE SYSTEM KIT




ELEMENTI AD ACCOPPIAMENTO MAGNETICO



Azione di accoppiamento

Perché l'azione di accoppiamento tra i diversi elementi del sistema Tactee possa dirsi stabile e soddisfacente, verificare che le tre calamite poste sull'elemento di presa combacino con le tre calamite poste sull'elemento da agganciare.

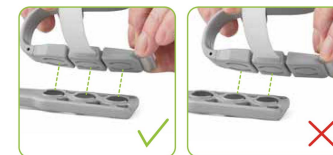

Accoppiamento tra l'elemento di presa e le varie posate (forchetta, cucchiaio, coltello)

Applicare l'elemento di presa alla mano e allacciare i suoi cinturini. Avvicinare ora i magneti posti nella parte inferiore dell'elemento di presa alla posata che si vuole accoppiare sino a quando sia stabilmente agganciata.



Accoppiamento tra l'elemento di presa e l'adattatore universale

Prima di accoppiare l'elemento di presa con l'adattatore universale, inserire all'interno dell'adattatore l'oggetto che si desidera utilizzare (spazzolino da denti, rasoio, penna, etc.). Assicuratevi sempre che l'ingombro dell'oggetto da inserire, abbia una dimensione conforme al foro dell'adattatore. Avvicinare ora l'elemento di presa all'adattatore universale assicurandovi che la parte terminale dell'oggetto inserito nell'adattatore sia rivolto nella direzione corretta.



Accoppiamento tra l'elemento di presa e l'adattatore per bottiglia/bicchiere (disponibile solo su richiesta)

Prima di accoppiare l'elemento di presa con l'adattatore bottiglia/bicchiere, avvolgere i due tiranti con le chiusure in Velcro® attorno all'oggetto da utilizzare. Assicuratevi che i due tiranti con chiusure in Velcro® siano chiuse attorno all'oggetto in maniera stabile e sicura. Avvicinare ora l'elemento di presa all'adattatore per bottiglia/bicchiere.



Disaccoppiamento tra l'elemento di presa e i vari elementi

Posate - Adattatore universale
Ruotare leggermente e gradualmente il polso in senso orario o in senso antiorario sino a quando l'elemento di presa si sgancia progressivamente dall'elemento agganciato.

Adattatore per bottiglia/bicchiere
Nel caso l'oggetto da disaccoppiare debba rimanere in posizione verticale (es. una bottiglia), esercitare una leggera spinta o trazione sull'adattatore da disaccoppiare sino a quando i due elementi si staccheranno tra loro.



Tactee

Il **Sistema Tactee** consente il ripristino dell'autonomia funzionale e dell'indipendenza nei gesti quotidiani delle persone con deficit funzionale mono o bilaterale della presa, mirando al miglioramento della loro "quality of life".

Il Sistema

I pazienti affetti da patologie quali tetraplegie, emiplegie post ictus, sclerosi multipla o da tutti quegli eventi morbosi che comportano un deficit funzionale di uno o di entrambi gli arti superiori ad oggi, in quelle che sono le maggiori pratiche motorie dove gli stessi arti vengono "utilizzati", devono essere inevitabilmente e quotidianamente assistiti, da terapisti occupazionali nel campo della riabilitazione o da familiari e/o "care giver" nell'ambiente domestico/sociale.

Il **Sistema Tactee** consente ad ognuno di questi pazienti la "restituzione" dell'autonomia funzionale e dell'indipendenza in una molteplicità di gesti quotidiani quali il mangiare, il bere, lo scrivere, etc., in assenza "totale" delle figure che li assistono e che sino ad oggi, devono ritenersi indispensabili. Tutto ciò è possibile grazie ad una serie di strumenti utili all'espletamento di diverse funzioni (come, ad esempio, le posate) che si accoppiano ad un elemento di presa che consente le operazioni di aggancio/sgancio e la sostituzione degli utensili in maniera facile, veloce e autonoma.

Nel sistema inoltre, sono presenti degli adattatori che rendono utilizzabili diversi oggetti di uso comune come ad esempio uno spazzolino per lavarsi i denti o il rasoio per farsi la barba.

Il Metodo

Il **Metodo Tactee** prevede l'utilizzo di questo sistema lungo il percorso riabilitativo del paziente ed il successivo uso in qualsiasi contesto, in modo semplice, discreto ed in totale autonomia.

I motivi ispiratori dello sviluppo e del design del **Sistema Tactee**, tengono conto, oltre che dei fondamentali principi di funzionalità, semplicità ed autonomia, di aspetti estetici peculiari per poter essere utilizzati facilmente e con discrezione in qualsiasi contesto, compreso quello sociale.

Sino ad oggi la risposta a questi bisogni, era ed è affidata a dispositivi che richiedono una residua funzionalità di presa della mano e che comunque hanno sempre la necessità di assistenza da parte di un "care giver". Normalmente queste azioni vengono compiute a fronte dell'impiego di un grande carico sia energetico che attentivo senza però, in ogni caso, garantire un risultato finale accettabile.

Tactee invece sfrutta il concetto dell'accoppiamento tra vari elementi garantendo altissime performance funzionali in assoluta autonomia e sicurezza.

La scelta dei materiali per ognuno degli elementi che compongono il **Sistema Tactee**, è stata sviluppata secondo i migliori criteri di analergicità, comfort, durabilità e semplicità di pulizia.

Il dispositivo si adatta all'utente e non viceversa anche grazie ad un disegno ergonomico che ne permette una "vestibilità" perfetta ed immediata sulla mano di chiunque lo indossi.

TABELLA MISURE

Elemento di presa		
Disponibile in 3 misure in versione ambidestra. La corretta misura di questo elemento è identificabile attraverso i fori presenti sulla sua struttura e si riferisce alla circonferenza del palmo della mano		
	SMALL - 1 foro da 19cm a 22cm	
		MEDIUM - 2 fori da 21cm a 24 cm
		LARGE - 3 fori da 23cm a 27cm
Altri elementi		
Disponibili in misura unica in versione ambidestra		

COMPOSIZIONE DEL SISTEMA TACTEE

Il sistema Tactee si compone dei seguenti elementi



SISTEMA MAGNETICO DI AUSILI



Semplifica i gesti quotidiani

