
Trasferimento

Accessori ed ausili minori per garantire
la massima sicurezza
durante i trasferimenti autonomi o
con l'aiuto di un caregiver

Imbracature

Queste imbracature sono utilizzabili con tutti i modelli di sollevatori classici, pieghevoli e a soffitto. La gamma si compone di imbracature realizzate in tessuto tridimensionale o in rete di poliestere, con morbide protezioni e maniglie per la migliore gestione della persona durante lo spostamento. I particolari tipi di materiali impiegati rendono le imbracature utilizzabili anche in immersione, con tempi di asciugatura molto ridotti e permette la perfetta sanificazione dei tessuti in grado di sopportare numerosi lavaggi. Ogni modello è dotato di quattro o sei punti di aggancio a diversi livelli, per garantire massima sicurezza e comfort per il paziente e permettere all'operatore di trasferire la persona in modo semplice e veloce.

Come scegliere la misura più adatta

La misura dell'imbracatura si identifica in relazione alla *taglia* dell'utente, cioè al rapporto tra il suo peso e l'altezza. La *portata massima dell'imbracatura* è un riferimento di sicurezza ed esprime il peso massimo che l'imbracatura "in funzione" può sopportare senza correre il rischio di rompersi (di norma esprime un valore superiore a quello indicato per la taglia corrispondente).

Riferimenti per la scelta della taglia

Attenzione! consultare sempre un caregiver prima di effettuare la scelta, per evitare qualsiasi rischio alla persona che deve essere movimentata.

Altezza utente (cm)	140-170	160-195	170 e oltre
Peso utente (kg)	45-75	70-150	140 e oltre
Taglia suggerita	Mis. M	Mis. L	Mis. XL

Portata massima

Taglia	M	L	XL	Unica
Peso utente max (kg)	220	220	270	150



Imbracatura a U senza testiera



Imbracatura a U con testiera

Materiali resistenti e rifiniture rinforzate per garantire prodotti di lunga durata, pratici e curati nel dettaglio per assicurare il massimo comfort ad utente e caregiver.

IMBRACATURA AD U CON E SENZA TESTIERA

Imbracatura in tessuto tridimensionale ipertraspirante, molto confortevole, la versione con testiera è ideale per persone con difficoltà di controllo del tronco e del capo (le parti flessibili inserite nella testiera garantiscono un buon contenimento del capo e trasferimenti più sicuri).

Codici e misure imbracatura senza testiera:
819031 mis. M - 819032 mis. L - 819033 mis. XL
Codici e misure imbracatura con testiera:
819035 mis. M - 819036 mis. L - 819037 mis. XL

IMBRACATURA AD U CON TESTIERA PER BI-AMPUTATI

Imbracatura in tessuto tridimensionale ipertraspirante, molto confortevole, con una struttura speciale per persone che hanno subito un'amputazione bilaterale sopra il ginocchio.

819028 - mis. unica

IMBRACATURA DA TOILETTE

Imbracatura in tessuto tridimensionale ipertraspirante, molto confortevole, include una cintura toracale imbottita e morbide fasce per le gambe, consente di spogliare il paziente per le operazioni di toilette anche quando è sospeso.

819020 - mis. unica

IMBRACATURA STANDARD

Imbracatura in nylon, un materiale robusto ed impermeabile, molto pratica da gestire con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

819030 - mis. unica

IMBRACATURA AD U A RETE CON E SENZA TESTIERA

Imbracatura in rete di poliestere, leggera ma molto resistente. La versione senza testiera viene utilizzata con persone che hanno buon controllo dei movimenti del capo e del tronco. Ideale anche per l'utilizzo durante le funzioni di toilette, grazie al particolare tessuto che ne rende veloce l'asciugatura.

Codici e misure imbracatura senza testiera:
819131 mis. M - 819132 mis. L
Codici e misure imbracatura con testiera:
819135 mis. M - 819136 mis. L



IMBRACATURA AD U
SENZA TESTIERA



IMBRACATURA AD U
CON TESTIERA




IMBRACATURA AD U
CON TESTIERA
PER BI-AMPUTATI



IMBRACATURA
DA TOILETTE



IMBRACATURA
STANDARD

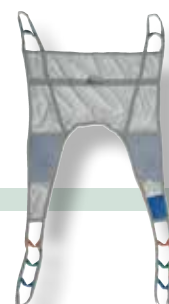

IMBRACATURA AD U A RETE
SENZA TESTIERA



IMBRACATURA AD U A RETE
CON TESTIERA

Ausili per trasferimento

Per la mobilizzazione della persona seduta o allettata

Una linea di prodotti specifici per consentire maggiore autonomia e facilitare i piccoli spostamenti e i trasferimenti delle persone con capacità motorie limitate, assicurando la massima sicurezza e comodità possibile sia alla persona che si sposta sia al caregiver che aiuta. Utilizzando in modo corretto questi ausili, infatti, si riduce notevolmente lo sforzo fisico anche a carico del caregiver poiché ogni ausilio è realizzato con forme e materiali studiati per limitare al minimo l'attrito tra le superfici coinvolte nelle operazioni. Completano la linea le protezioni imbottite per sponde utilizzabili su tutti i tipi di letti.



TAVOLETTE DI TRASFERIMENTO

Tavolette di forma rettangolare o a boomerang, realizzate in legno con speciale verniciatura e bordi smussati, permettono alla persona di passare dalla carrozzina ad altre superfici e viceversa in modo autonomo o assistito.

Codici e misure

- 684001 Tavoletta forma rettangolare cm 60x25
- 684002 Tavoletta forma rettangolare cm 75x25
- 684003 Tavoletta forma boomerang cm 70x28




BEDSTRING

Cintura per il riposizionamento autonomo a letto.

Codici e misure

- 408200 dimensioni cm 140x13

Teli voltapazienti tubolare

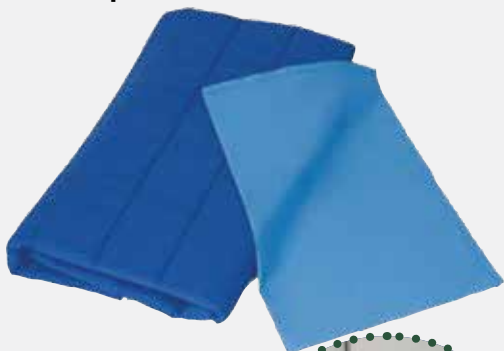

Telo voltapazienti con maniglie



TELI VOLTAPAZIENTE

Il telo voltapaziente, di forma tubolare o per traslazione con maniglie, è un ausilio estremamente utile perchè facilita lo spostamento laterale del paziente, il cambio di postura ed il trasferimento. E' disponibile in 3 versioni, a telo tubolare leggero o con imbottitura trapuntata, e in versione con due strati sovrapposti uniti tramite velcro: uno strato è dotato di maniglie per gli spostamenti, mentre l'altro è realizzato in un tessuto a basso attrito.

I teli sono ad alta resistenza e bassissimo coefficiente di attrito ed sono radiotrasparenti per consentire di lasciarli sotto alla persona durante gli esami. Il tessuto dei teli, inoltre, è impermeabile ai liquidi e ha un'alta biocompatibilità, quindi non provoca irritazioni né reazioni cutanee. Nella versione imbottita la fibra cava siliconata è in quantità adeguata e risulta quindi molto morbida e altamente traspirante; per mantenere la fibra sempre nella corretta posizione ed evitare che si sposti o si ammassi sui bordi, sono state realizzate delle cuciture lungo tutta la fodera.

Codici e misure

680001 Telo voltapazienti imbottito cm 60x80
680002 Telo voltapazienti imbottito cm 140x80
680003 Telo voltapazienti imbottito cm 190x80

680101 Telo voltapazienti leggero cm 60x75
680102 Telo voltapazienti leggero cm 100x75
680103 Telo voltapazienti leggero cm 190x75

680304 Telo voltapazienti con maniglie per traslazione cm 150x70

Qualche consiglio

• Posizionare il **telo tubolare** sotto il paziente in modo che i due lati possano scorrere l'uno sull'altro nella direzione dove si vuole spostare la persona.

• Nel caso del **telo per traslazione con maniglie**, posizionare un telo a contatto con il materasso e l'altro sopra, a contatto con il paziente in modo che possano scorrere l'uno sull'altro. Tramite le diverse maniglie, muovere il paziente nella posizione o direzione desiderata.



CINTURA SOLLEVAPAZIENTE CON MANIGLIE

Cintura a fascia unica dotata di maniglie per effettuare le operazioni di movimentazione in sicurezza. Costituita da una fascia toracica alta 15 cm per garantire un buon supporto durante i trasferimenti, dotata di velcro e di una cinghia con fibbia.

Codici e misure

408202 per girovita cm 65-90

408203 per girovita cm 85-105



PROTEZIONI PER SPONDE

Coppia di imbottiture laterali applicabili a tutte le sponde per letti. Rivestimento in cotone, lavabile in lavatrice.

Codici e misure

40900 Coppia di sponde in mis. unica, ogni sponda è cm 145x90



Richiedi un preventivo al nostro Customer Care:

tel (+39) 031 33 56 811
ordini@fumagalli.org



Fumagalli Care&Reha srl
Piazza Puecher 2 - 22037 Ponte Lambro
tel (+39) 031 33 56 811
info@fumagalli.org - www.fumagalli.org