

BJ-259

Control+

Guida rapida per l'utente



BJ Live!
smart solutions that suit you

BJ Live!
smart solutions that suit you


www.bjliveat.com

1. Parti del dispositivo

Utilizzare questo prodotto per controllare qualsiasi dispositivo elettronico e gli elementi del proprio ambiente domestico (luci, tapparelle, porte, letto, ecc) dal tablet o smartphone Android o iOS.

Questo prodotto è costituito dai seguenti elementi:

Control+:

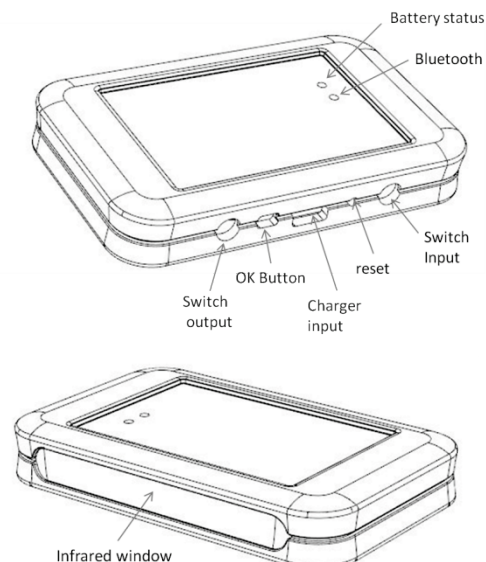

App di controllo: applicazione per cellulari e tablet Android e iOS.

Control+ usa Bluetooth Smart (Bluetooth low energy, BLE) per stabilire il collegamento con il dispositivo mobile in cui è installata l'applicazione. E' garantita la copertura di almeno un ambiente.

Questo telecomando funziona con radiofrequenza e segnali infrarossi.

2. Iniziare

1

Caricare la batteria

E' importante caricare completamente la batteria prima dell'uso iniziale. Per caricare il dispositivo, collegare il cavetto al caricabatterie in dotazione e collegarlo al dispositivo tramite la porta micro USB (Charger input).

Durante la carica, il LED di stato della batteria rimarrà rosso. Quando la batteria è completamente carica, il LED diventerà verde. Quando il LED è verde, è possibile scollegare il caricabatteria.

Il LED della batteria lampeggerà in rosso ogni 4 secondi per avvisarvi che la batteria si sta per scaricare.

2


Scaricare e installare l'app

Control app è disponibile su Google Play per i dispositivi Android e su l'App Store per iOS. Per scaricare l'applicazione cercare "Control by BJLive!".


3

Collegare Control+ al dispositivo sul quale è stata installata l'applicazione

1. Attivare il Bluetooth nel dispositivo in cui l'applicazione è installata.
2. Ricordate che Control + utilizza **Bluetooth low energy**, quindi è compatibile solo con i dispositivi che utilizzano questa tecnologia. Si prega di verificare l'elenco dei dispositivi compatibili nel nostro sito: <http://bjliveat.com/environmental-control/content-control-plus.html>
3. Aprire l'applicazione e selezionare "Impostazioni" dal menu. Selezionare la prima opzione nella lista.

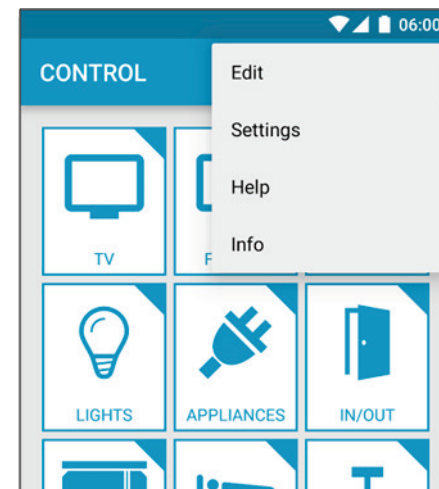

4. Selezionare "CTRL+"

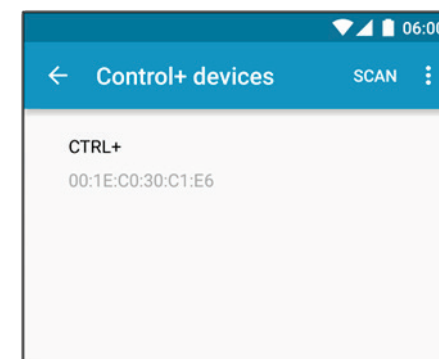

Se ci sono altri dispositivi Control+, saranno tutti visualizzati nell'elenco. Selezionare il dispositivo Control+ che si desidera collegare per testare ogni dispositivo.


Se non avete abilitato il Bluetooth nel vostro dispositivo mobile prima di aprire l'applicazione, l'applicazione mostrerà un messaggio per attivare il Bluetooth. Quindi procedere come indicato nei punti 2 e 3.

3. Utilizzare il dispositivo

Con l'app. di Control+ sarà possibile **personalizzare l'interfaccia di controllo e le varie funzioni**

Vi troverete una serie di modelli predefiniti già preparati con diversi livelli e diversi pulsanti presenti in ogni livello per controllare l'accesso alla casa, luci, elettrodomestici, impianto stereo, TV, ecc

L'utente può utilizzare il modello predefinito o creare nuovi pulsanti e livelli. In ogni caso sarà necessario registrare i segnali dei dispositivi che funzionano con l'infrarossi dai rispettivi telecomandi.

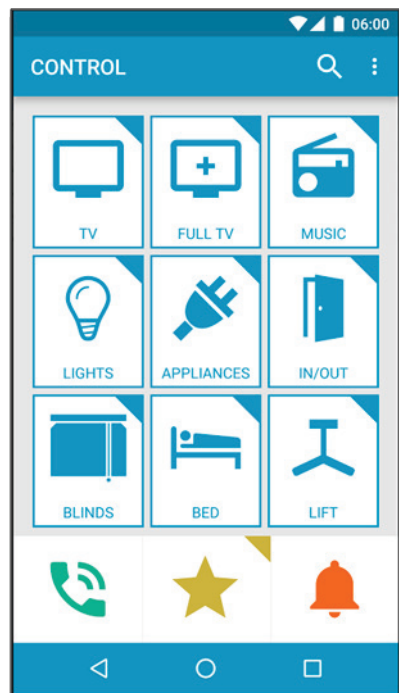

Utilizzare la Guida fornita con l'applicazione per imparare come creare pulsanti / modificare i modelli e registrare nuovi segnali.

Se il Control+ ha esaurito la batteria o è fuori portata, viene visualizzato un messaggio di avviso.

Dispositivi medici

Alcune apparecchiature radio possono interferire con il funzionamento di dispositivi medici che non sono adeguatamente protetti.

Consultare un medico o il produttore del dispositivo medico per determinare se è adeguatamente schermato da segnali a radiofrequenza esterni.

Dispositivi medici impiantati

I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 cm (6 pollici) tra un dispositivo senza fili e un dispositivo medico impiantato, come un pacemaker o un defibrillatore, al fine di evitare possibili interferenze con il dispositivo medico.

Ambiente operativo

- Durante la registrazione di segnali ad infrarossi, **assicurarsi che non vi sia nulla vicino che genera un'altro segnale a raggi infrarossi.** Nota che alcuni tipi di rivelatori di luce e di presenza fluorescenti emettono segnali infrarossi.
- Control+ può registrare **segnali ad infrarossi di 38KHz.** I segnali con una frequenza superiore non possono essere registrati.
- Altri prodotti che utilizzano la stessa **banda di frequenza radio (433 MHz)** come questo telecomando possono interferire con il controllo dei ricevitori. Assicurarsi che né il telecomando né i ricevitori si trovano vicino a queste fonti.

4. Manutenzione del dispositivo

- **Evitare che il dispositivo si bagni.** Umidità e liquidi possono danneggiare i componenti o circuiti elettronici del dispositivo. I danni provocati dall'acqua al vostro dispositivo possono invalidare la garanzia. **La polvere può causare il malfunzionamento del dispositivo.**
- **Non far cadere il prodotto** e non sottoporlo a urti. Può essere danneggiato in caso di caduta. **Non pitturare il dispositivo** e non attaccare adesivi.

- **Non lasciare il dispositivo vicino a campi magnetici.**
- **Non smontare,** modificare o riparare il dispositivo. Eventuali cambiamenti o modifiche apportate al dispositivo potrebbe invalidare la garanzia.
- Per la **pulizia** del dispositivo: Usare un panno o un panno morbido per pulire il dispositivo e il caricabatterie. **Non usare prodotti chimici, detergenti o solventi.**

Non utilizzarlo per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato.

Cura della batteria

La batteria installata nel dispositivo è una singola cellula con polimero agli ioni di litio. Le batterie ai polimeri di ioni di litio non possono sopportare gli eccessi di temperatura. In caso di surriscaldamento, la batteria potrebbe incendiarsi. Per queste ragioni:

- Non lasciare il telecomando in prossimità di fonti di calore come radiatori, coperte elettriche, riscaldatori, ecc
- Non lasciare il telecomando all'interno di veicoli.
- Caricare la batteria solo con il caricabatterie da 5V o tramite una porta USB.

La batteria può essere caricata e scaricata innumerevoli volte, ma con il tempo si esaurisce. Sarà necessario sostituire la batteria quando la durata della batteria è notevolmente ridotta rispetto al normale. Per fare questo, contattare il proprio distributore.

Il tempo di ricarica completa della batteria può variare tra 4 o 5 ore. Quando la batteria è completamente carica, scollegarlo dal caricabatteria, una carica eccessiva può limitare la vita della batteria.

Frequenti caricamenti e scaricamenti possono stressare la batteria e riducono drasticamente la sua durata di vita.

Il modo corretto per scollegare il dispositivo da un alimentatore esterno è, in primo luogo, staccare il cavo dalla presa di corrente, quindi rimuovere il connettore Usb dal dispositivo.

5. Caratteristiche tecniche

- Bluetooth Smart (Bluetooth a basso consumo energetico)
- Radio Frequenza: 433 MHz (ICM).
- Frequenza ad infrarossi: 38 kHz.
- Dimensioni: 81 x 49 x 12 mm
- Compatibile con BJLive! Enablers (dispositivi)
- Switch input 3.5mm mono jack (femmina)
- Switch output 3.5mm mono jack (femmina)
- Batteria Ion-Polymer a lunga durata
- Porta Micro-USB per la ricarica

6. Varie informazioni

Disposizione

I rifiuti di prodotti elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici!

Smaltire il prodotto di scarto attraverso un punto di raccolta per i rifiuti elettronici o tramite il vostro rivenditore di fiducia. Qualsiasi manomissione non autorizzata, o modifiche al prodotto annullerà la garanzia.



Garanzia

Entro il periodo di garanzia di legge ci impegniamo a riparare gratuitamente mediante riparazione o sostituzione eventuali difetti del prodotto derivanti da materiali o di produzione.

Qualsiasi manomissione non autorizzata o modifiche al prodotto annulleranno questa garanzia.

Conformità

Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali della direttiva 2004/108 / CE.

La dichiarazione di conformità può essere scaricata dalla pagina web del prodotto all'indirizzo www.bjliveat.com.