

ComuniKit Inclusione® - tablet e materiali per partecipare V2.1



Comunikit® Inclusione si compone di diversi strumenti che hanno lo scopo di **supportare insegnanti e terapisti per la strutturazione di attività inclusive a favore di bambini con severe compromissioni cognitive e del linguaggio, anche associate a difficoltà motorie.**

Il kit è predisposto per consentire anche il **collegamento a distanza.**

SCHEMA DATI

Il materiale che compone il kit consente attività ludiche di stimolazione sensoriale ed esperienze di relazione causa/effetto, include poi altre proposte mirate a stimolare semplici autonomie ed a controllare comportamenti problema; stimola a compiere scelte controllate, costituendo così un sostegno allo scambio comunicativo ed alla partecipazione ad attività sociali.

ComuniKit Inclusione si compone di un **ampio set di strumenti**: comprende materiale low tech strutturato per la CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) e diverse proposte basate su tablet, ma che includono anche materiali manipolabili.


Una prima proposta prevede una insolita quanto efficace attività di **stimolazione sensoriale**, che richiede di riconoscere alcuni rumori comuni e familiari, da svolgere in forma di gioco insieme ai compagni. Questo potrebbe tra l'altro facilmente evidenziare punti di forza in bambini con problematiche visive e motorie, che attraverso l'udito compensano parzialmente le loro difficoltà. L'attività risulta comunque particolarmente inclusiva in quanto prevede un gioco e attività cui raramente anche i compagni vengono esposti.



Un altro compito che può essere svolto **insieme ad un compagno** di giochi, basato su una attività generalmente motivante legata al cibo, richiede la composizione di una pizza seguendo semplici **istruzioni visive**: il personaggio sul tablet esprime la sua richiesta di ingredienti ed il bambino prepara l'ordinazione con **pezzi manipolabili**. Il personaggio fornisce un feedback non verbale, che aiuta il bambino a familiarizzare con le **espressioni dei volti**. Un altro bambino o un adulto (o il bambino stesso, se competente in matematica) completerà il gioco portando a termine le fasi di pagamento, rendendo possibili anche attività di peer tutoring.



La durata delle attività può essere regolata grazie ad un **temporizzatore**, **che permette di controllare visivamente il tempo che scorre**, preparandosi così per tempo al cambiamento. Questo consente di gestire **ansia e frustrazione**, in quanto il bambino può così controllare la situazione presente, anticipando gli eventi successivi, grazie anche alla possibilità di associare all'indicatore luminoso del tempo che scorre immagini familiari delle attività temporizzate. Il temporizzatore è un **dispositivo autonomo** che non limita l'utilizzo delle altre componenti.

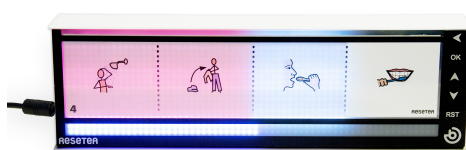

Una app per la **gestione dei comportamenti problema** supporta ulteriormente l'autocontrollo, rinforzando i comportamenti socialmente accettabili.

Sempre in questa direzione, con l'obiettivo di ampliare le autonomie del bambino, è orientata una **app che fornisce diversi esempi di videomodeling** e permette di creare anche modelli personalizzati. Questi modelli costituiscono delle guide per la realizzazione di sequenze di azioni, con l'obiettivo di portare a termine un compito in piena autonomia (lavarsi le mani, apparecchiare, ecc).

La dotazione si completa con una app per la proposta di semplici **attività didattiche personalizzate**, arricchita con alcune **attività esclusive per ComuniKit® della collana DidApp**.

Per favorirne l'utilizzo in autonomia e sicurezza, il tablet del ComuniKit è dotato di una **custodia con maniglia ripiegabile** e di uno **zainetto** per il trasporto.

Il tablet è predisposto anche per il collegamento a distanza e permette di condividere la visualizzazione delle attività che vengono svolte, con possibilità di orientare l'inquadratura delle telecamera: questo consente di realizzare interventi di **didattica e riabilitazione anche a distanza**.

Alcuni video

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tablet:

- Ipad 10,2" 64 GB WI Fi
- Impostazione per limitazione d'uso (blocco) sull'applicazione desiderata (sblocco tramite password).
- Avviamento iPad
- Creazione account iTunes
- Pre installazione applicazioni
- Aggiornamento e test del prodotto finito
- Guide e manuali in italiano
- fino a 12 ore circa di utilizzo continuo, ricarica tramite alimentatore o tramite computer via USB
- *Possibilità di personalizzazione della configurazione hardware e/o software su richiesta.*
- Custodia morbida antiurto con maniglia ripiegabile
- Zainetto per il trasporto.

**La composizione dei kit potrebbe subire variazioni senza preavviso con articoli di pari valore*

PRESCRIVIBILE TRAMITE SERVIZIO SANITARIO CON IL CODICE:

- ISO 22.21.09.003 Comunicatore dinamico

CODICE MEPA: CLEOCKI00

Data revisione: 07/11/2023



<https://www.leonardoausili.com/>

COPYRIGHT 2018 LEONARDOAUSILI.COM | P.IVA: 01795770351 | ALL RIGHTS RESERVED